

IONTOFORESEBEHANDLING FREMGANGSSPÖRING



PÅMINNELSE:
Hold deg til planen din og gi den tid

Måned	År
-------	----

[illegible]

Våthetsnivå: -1 = Svært tørre/hudsprekker 0 = Ingen svette 1= Fuktig 2= Våt 3 = Dryppende våt

Hidroxa



For å sikre at du får best mulig resultat, har vi noen tips til deg før du starter med behandlingene dine:

- **Tips nr. 1:** Hvis du har små sår, anbefales det å dekke dem med et tykt lag med for eksempel vaselin. Dette er fordi skadet hud har en lavere motstand som gjør spenningen høyere i områder hvor huden er skadet.
- **Tips nr. 2:** For best resultat, bytt plass for de røde og svarte kablene mellom hver behandling for å sikre at både høyre og venstre side får strøm fra både rød og svart stikkontakt.
- **Tips nr 3:** Vi anbefaler at har en teskje salt i hver vannbeholder.
- **Tips nr 4:** Hvis hudens motstand blir høyere etter en stund, og gjør det umulig å utføre en behandling, er det bra. Det betyr at du har oppnådd en effekt. Prøv å vente noen dager før du utfører neste behandling.
- **Tips nr 5:** : Hvis du føler at du begynner å nå ønsket effektnivå, kan du prøve å utføre behandlinger sjeldnere. Hvor ofte du trenger å utføre disse behandlingene er svært individuelt. Prøv å se hva som fungerer best for deg.

Vennligst husk - Det tar vanligvis noen uker før du begynner å føle effekten av behandlingene. Hvis ingen fremgang kan registreres etter flere uker, vennligst kontakt oss så vi kan gi råd og finne ut om du har gjort alt som kan gjøres før vi utelukker iontoforese som en mulig løsning.

For svar på ethvert spørsmål du måtte ha, ta en titt på vår FAQ-side på nettstedet vårt, eller kontakt oss når som helst via e-post til kundtjanst@hidroxa.com eller på vår chat.


Lykke til med behandlingene dine!

Slik bruker du din Hyperhidrosekalender

Ved behandlingene hjelper det å ha en forhåndslagt plan. Bruk denne kalenderen som en enkel måte for å administrere behandlingen og spore fremgangen.

- De blanke kalenderdagene har plass for å skrive ned nyttig informasjon
- Bruk Notatseksjonen nederst på hver dag for å registrere fremgangen din, mulige bieffekter, tilfredshet med behandlingen og spørsmål du måtte ha, samt annen informasjon
- Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt oss via e-post til kundtjanst@hidroxa.com eller på chat på vårt nettsted fra mandag til fredag kl. 08.00 til 09.00 CEST

Se vår instruksjonsvideo

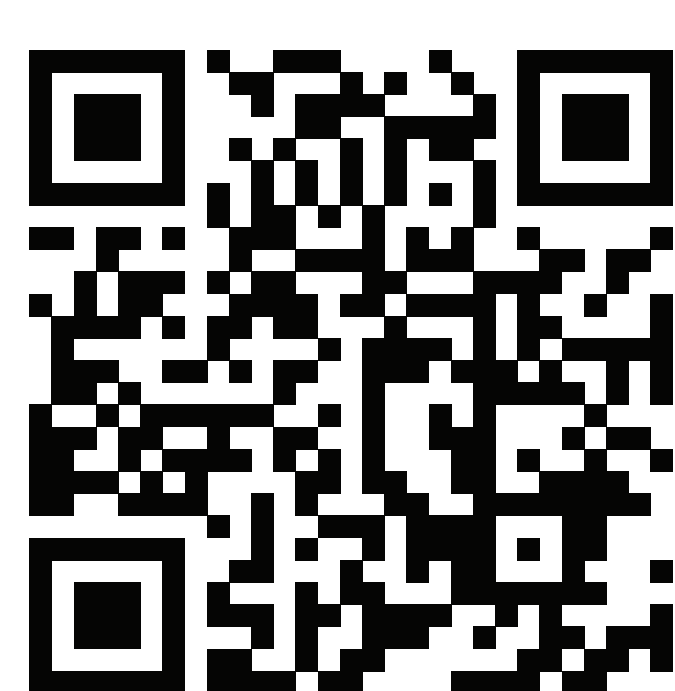

Skann meg

